

Infravörös hőmérő LCD kijelzővel

Használati utasítás

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a hőmérőt. Az infravörös sugárral ellátott termék, arra lett kifejlesztve, hogy személyek és tárgyak hőmérsékletét akár 3-5 cm távolságból is képes legyen megmérni.

Figyelem:

Kérjük, mielőtt a terméket használja, győződjön meg róla, hogy az elemeket (a csomag nem tartalmazza) megfelelően a helyükre illesztette, valamint azok nem sérültek. Ne helyezze a hőmérőt semmilyen túlhevített vagy túl alacsony hőmérsékletű folyadékba, hosszú ideig. Kerülje a vízben és napfényben történő használatot. Magas elektromágnes környezetben a készülék teljesítménye csökkenhet. A termék csak az arra kijelölt szakemberrel javítható, amennyiben meghibásodást tapasztal, ne szerelje szét, az esetleges sérülések elkerülése végett.



ÉRINTÉSMENTES HASZNÁLAT

Az infravörös sugárnak köszönhetően, a hőmérőt nem szükséges az adott személlyel vagy tárggyal közvetlen érintkezésbe hozni, anélkül is gyorsan és egyszerűen használható, ez pedig nagyon kedvező lehet higiéniai szempontból. A termék egészségügyi besorolás szerint a II. kategóriába tartozik.

Használatba helyezéshez kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a „SCAN” gombot.

Az emberi testhőmérsékletet 32-42,5 °C tartományban méri, amely 89.6 - 108.5 °F tartományra tehető. Tárgyak esetében 0-100°C között, ami 32 - 312°F felel meg. Esetleges mérési tévedések személyek esetében ± 0.2 ° C, tárgyak esetében ± 1 ° C.

A termék LCD kijelzővel rendelkezik, melyen a használó pontosan láthatja, hogy a mért hőmérséklet milyen tartományba esik, ennek szélső határértékei pedig beállíthatóak a készüléken. Amikor a kijelző zölden világít, az érték megfelelő. Amennyiben a hőmérsékletet nem sikerült megmérni, a kijelző piros világít és „Lo” felirat látható rajta. Amennyiben a mért hőmérséklet átlépi a beállított határértéket, a készülék 5 alkalommal csipog.

SPECIFIKÁCIÓK

Model:	OT-TM-1
Mérési távolság	3-5 cm
Mérési tartomány	32 - 42.5 °C
Áramellátás	DC 3V (2 db AAA elem)
Mérési időtartam	15 másodperc
Méret	19 cm x 4 cm x 4cm

Súly

67 gramm

Hibakódok

Hibakód	Megoldás
„HI” felirat a kijelzőn	<p>Ez a felirat csak az eszköz tárgymódbba történő állításakor jelenhet meg.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a mérni kívánt tárgyat. Próbálja meg, nem közvetlen hőhatás után megmérni. 2. Ellenőrizze, hogy a beállított határérték 0 felett van. 3. Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet, amennyiben nagy hőmérséklet ingadozást tapasztal, befolyásolhatja a mérési hőmérsékletet. Ebben az esetben 10 perccel később próbálja újra a mérést.
„LO” felirat a kijelzőn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze a mérni kívánt tárgyat. Próbálja meg, nem közvetlen hőhatás után megmérni. 2. Ellenőrizze, hogy a beállított határérték 0 felett van. 3. Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet, amennyiben nagy hőmérséklet ingadozást tapasztal, befolyásolhatja a mérési hőmérsékletet. Ebben az esetben 10 perccel később próbálja újra a mérést. 4. Ellenőrizze a mérési távolságot. (3-5 cm)
A gombok megnyomásra nem reagálnak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ellenőrizze az elemeket 2. Ellenőrizze, hogy a főmenüben megtörténtek-e a szükséges beállítások
Az eszköz nem kapcsol be vagy nem rendeltetésszerűen működik	Ellenőrizze az elemeket.
Az eszköz nem ad ki visszajelző hangot	Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások be vannak kapcsolva
Az eszköz minden előjel nélkül kikapcsol	Ellenőrizze az elemek töltöttségét vagy cserélje ki őket