

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Automata hőmérő és kézfertőtlenítő állomás

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Tartsa a kezét a kézfertőtlenítő állomás alá, a szenzor automatikusan érzékeli, és fertőtlenítő folyadékot adagol.
2. Tartsa csuklóját a testhőmérséklet mérő szenzor elé, ezt automatikusan érzékeli és a kijelzőn megjelenik az aktuális testhőmérséklet. Az eltérés Normál testhőmérsékletnél a kijelző zölden világít, amennyiben a testhőmérséklet eltér a normálistól, a kijelző pirosan világít.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-HS-2
Energiaellátás tápellátás	4 AAA elem vagy
Mérési skála	32 °C ~ 43 °C
Esetleges mérési tévedés	± 0.3 °C
Ajánlott üzemeltetési hő	10C°-40C°
Szerelhetőség	Állvány
Termék mérete	131mm x 399mm x
138mm	



KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.