

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Véroxigénszint mérő eszköz

Multifunkciós eszközünk segítségével megmérheti éppen aktuális véroxigénszintjét, pulzusát, valamint láthatja vérátáramlási mutatója mellett, pulzusának hullámait. Kicsi és egyszerű használatából adódóan bárhová magával viheti.

Figyelem!

Mielőtt üzembe helyezi a terméket, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírtakat. Minden használat előtt alaposan mosson kezet, amennyiben lehetősége van rá, fertőtlenítsen le orvosi alkohollal, majd a terméket is fertőtlenítsen. A fertőtlenítés minden használat után javasolt.

A véroxigén elégtelen szintje számos megbetegedéssel kapcsolatba hozható. Az alacsony véroxigénszint legtöbb esetben valamilyen betegségre utal, enyhe kimerültségtől kezdve, akár egészen súlyos megbetegedéseket is okozhat. Készülékünkkel otthon vagy akár útközben is könnyen ellenőrizheti véroxigénszintjét.

A normál tartomány 95-98 közé tehető, 90-94 között, valószínűsíthetően friss levegőre van szüksége. A 90 alatti tartomány alacsonynak mondható.

A készülék a véroxigénszint mellett, a pulzusát is képes megmérni, ennek normál nyugalmi tartománya felnőtteknél 60-100 közé esik, ideális értéke 72-76.

A véroxigén mérő a benne található szenzor segítségével méri az Ön értékeit, akár néhány másodperc alatt. Amennyiben a terméket 10 másodpercig nem használja, az elemek energiatakarékosságának érdekében, a készülék kikapcsol.

Amennyiben az elemek már gyengék, a jobb felső sarokban lévő ikon jelezni fogja Önnek.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Minden esetben körmével felfelé tegye a készülékbe az ujját. A terméket álló és fektetett nézetben is tudja használni, ehhez nyomja meg a középső gombot.

1. Helyezze be az elemeket a véroxigén mérőbe. Ügyeljen rá, hogy a „-” „+” jelzéseknek megfelelően legyenek elhelyezve, majd tegye rá a hátlapot.
2. Nyissa ki a csipeszt, tegye az ujját a mérőbe, lehetőleg teljesen, körömmel felfelé, majd csukja be a csipeszt.
3. Tegye a karját vízszintes felületre! A leghatékonyabb eredmény elérése érdekében, eközben kérjük ne mozgassa az ujját.
4. Nyomja meg a készülék közepén található gombot és az eszköz máris működésbe lép. A mérés körülbelül 30 másodpercig tart.
5. A készüléken megjelennek az értékek.

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-BO-1
Mérési tartomány	70%~99%
Esetleges mérési tévedés	± 2%
Pulzus tartomány	30BPM-240BPM
Esetleges mérési tévedés	± 2 BPM
Ajánlott használati hőmérséklet	5°C~40°C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C ~ 40 °C
Termék mérete	5,8cm x 3,2cm x 3cm
Termék súlya(elemek nélkül)	26.5 gramm

