

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## Automata hőmérő és kézfertőtlenítő állomás

Automata hőmérő és kézfertőtlenítő állomásunkkal érintés nélkül mérheti meg lázát, fertőtlenítheti kezét. Modern megjelenésének és beépített szenzorainak köszönhetően tökéletesen megkönnyíti a használatot. Letölthető mobilalkalmazás segítségével pedig a test hőmérsékleti előzményeket is figyelemmel követheti.

Automatikusan adagolja a kézfertőtlenítőt, illetve beépített szenzorával érintés nélkül, csuklóját odatarva méri meg a testhőmérsékletet. Falra szerelhető és állványra is állítható. A termék működtethető 4 AAA elemmel vagy tápellátásból.

A készülék 3 féle folyadék adagolására képes (1300 ml kapacitású) :

- Hab
- Gél
- Spray

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Tartsa a kezét a kézfertőtlenítő állomás alá, a szenzor automatikusan érzékeli, és fertőtlenítő folyadékot adagol.
2. Tartsa csuklóját a testhőmérséklet mérő szenzor elé, körülbelül 3-5 cm-re, ezt automatikusan érzékeli és a kijelzőn megjelenik az aktuális testhőmérséklet. A normál testhőmérsékletnél a kijelző zölden világít, amennyiben a testhőmérséklet eltér a normálistól, a kijelző pirosan világít.

### SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-HS-1
Energiaellátás tápellátás	4 AAA elem vagy
Mérési skála	32 °C ~ 43 °C
Esetleges mérési tévedés	± 0.3 °C
Ajánlott üzemeltetési hő	10C°-40C°
Szerelhetőség	Falra szerelhető
Termék mérete	131mm x 399mm x
138mm	



### KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a

készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.